

# Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet

## MyClean<sup>®</sup> B Bohrerbad

plus



- Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion von rotierendem Dentalinstrumentarium
- Wirkt Bakterizid, fungizid, mycobakterizid (inkl. M.-terrae)
- Wirkt virusinaktivierend (inkl. HBV/HIV) BVDV und Vaccinia (begrenzt viruzid gem. RKI)
- Speziell für rotierende Dentalinstrumente (Bohrer) entwickelt
- Mit wirksamem Korrosionsschutz
- Kein Gefahrstoff gemäß EG-Richtlinie
- Geeignet für Ultraschallbad
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Angenehmer Geruch, keine schädlichen Emissionen

### Anwendung:

Zur Desinfektion von rotierendem, medizinischem Instrumentarium im Einlegeverfahren oder Ultraschallbad.

### Ausführungen:

#### MyClean B Bohrerbad

| Artikelbeschreibung / Article Description | Duft / Aroma      | Pack.-Inhalt / Content | Art.Nr. / REF | EAN           | PZN      | Pack / VE |
|---|-------------------|------------------------|---------------|---------------|----------|-----------|
| Bohrerbad                                 | Neutral / neutral | 5 Liter / 5 litres     | 79636         | 4046153116591 | 10306036 | 2         |
| Bohrerbad                                 | Neutral / neutral | 10 Liter / 10 litres   | 79658         | 4046153121762 | 11370065 | 1         |

### Einwirkzeiten :

|   |               |
|---|---------------|
| Bakterizid, fungizid, mycobakterizid gemäß DGHM (M.-terrae und M.-avium), HBV/HIV wirksam | konz. 15 Min. |
| Bei sehr gut vorgereinigtem Instrumentarium   | konz. 5 Min.  |

### Hinweis:

Standzeit bei gut vorgereinigtem Instrumentarium bis zu 7 Tagen.

### Zusammensetzung:

In 100g sind enthalten: Wirkstoffe: 1,125g Cocospropylenguanidiniumdiacetat. Weitere Bestandteile: synergetische Additive, Hilfsstoffe, Komplexbildner, Duftstoffe, Korrosionsschutzmittel

### Qualitätssicherung:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG  
CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen  
CE-Klassifizierung: Klasse IIb

### Verwendbarkeit:

 3 Jahre

### Symbole:



 MaiMed GmbH  
Robert-Koch-Str. 1-7  
29643 Neuenkirchen - Germany  
TD-MyClean-B Bohrerbad 20150817