

# DESIMATIC-S



## Klarspüler und Entkalker für die thermische Aufbereitung in Steckbeckenautomaten

### Einsatzbereich

Flüssiger Klarspüler und Entkalker für die maschinelle Aufbereitung in thermisch arbeitenden Steckbeckenautomaten, in denen Urinflaschen, Saugflaschen und Einsatzkörbe mit Utensilien aufbereitet werden.

### Anwendung

Dosierung erfolgt automatisch und wird in Abhängigkeit von der ortsspezifischen Wasserhärte optimal eingestellt. Entsprechend den Empfehlungen der Gerätehersteller wird das Konzentrat an die Dosierpumpe angeschlossen\*.

Die Verwendung von enthärtetem Wasser verbessert die Produkteigenschaften und verringert den Produktverbrauch. Bei einer starken Verkalkung des Heizstabes ist vorab eine Entkalkung z.B. mit PEROTEX EK zu empfehlen.

Dosierempfehlung\*: Wasserhärte ≤ 10 °dH - 0,5 ml/l  
Wasserhärte > 10 °dH - 1,0 – 1,5 ml/l

\*Dosierung durch Fachpersonal durchführen

### Produkteigenschaften

- Gewährleistet eine fleckenfreie Trocknung des Spülguts
- Schützt Steckbeckenspülen vor Verkalkung
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Schaumarme, umweltfreundliche Formulierung
- Frei von Duftstoffen
- Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte

### Technische Informationen

Kanister à 5 Liter Art.-Nr. 20590

### Zubehör

Zapfhahn Art.-Nr. 80075  
Dispenser für Kanister Art.-Nr. 80301

Kennzeichnung gemäß EG-Verordnung 1272/2008 (CLP): keine



Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. (D) 0917

pH conc 

0	4	6	8	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

**DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA**  
Taunusstraße 19 · 80807 München  
Tel. +49 89 3506080  
info@dr-schnell.de  
www.dr-schnell.com

*Wir leben Hygiene*  
**DR.SCHNELL**  
QUALITÄT UND SERVICE